

Link do produktu: <https://ekodomek.eu/rozgrzewajace-plastry-przeciwbolowe-thermolka-3-sztuki-cannaderm-p-2407.html>



Rozgrzewające plastry przeciwbólowe THERMOLKA 3 sztuki | Cannaderm

Cena	26,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	8594059737533
Producent	Simply You Pharmaceuticals

Opis produktu

Plastry rozgrzewające Thermolka to wyrób medyczny przeznaczony do miejscowego stosowania w przypadku **bólu mięśni, stawów i pleców**, a także przy **szttywności karku oraz przeciążeniach ścięgien**. Dzięki efektowi rozgrzewania pomagają **rozluźnić napięte partie ciała** i poprawić komfort ruchu.

Formuła oparta na składnikach takich jak **mentol, eter butylowy kwasu waniliowego oraz olej konopny** zapewnia **stopniowe, odczuwalne ciepło**, które wspiera odprężenie mięśni i redukcję dyskomfortu. Dodatkowo **gliceryna** pomaga utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry w miejscu aplikacji.

Produkt zapewnia **działanie do 8 godzin**, a jego forma umożliwia wygodną aplikację oraz łatwe usunięcie bez nadmiernego podrażniania skóry.

⚠ **Nie stosować przy aktywnych stanach zapalnych.**

Zastosowanie:

- bóle mięśni i stawów
- bóle pleców
- sztywność karku
- przeciążenia mięśni i ścięgien

Najważniejsze cechy:

- **efekt rozgrzewający i rozluźniający**
- **do 8 godzin działania**
- wspiera komfort ruchu
- zawiera **olej konopny**
- wygodna aplikacja i usuwanie

Sposób użycia:

Oderwać folię ochronną, nałożyć plaster na **suchą i czystą skórę**, delikatnie docisnąć.

Stosować **1-3 plastry dziennie**.

Jeden plaster można nosić maksymalnie **do 8 godzin**.

Ważne informacje:

-
- plastry są **jednorazowe**
 - nie stosować kilku plastrów w tym samym miejscu
 - brak kleju – można zabezpieczyć odzieżą
 - nie stosować podczas intensywnego wysiłku fizycznego

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- nie stosować u dzieci poniżej **3 lat**
- dzieci stosują pod nadzorem dorosłych
- nie naklejać na brzuch w ciąży
- nie stosować na **uszkodzoną skórę, błony śluzowe i okolice oczu**
- w razie reakcji alergicznej – natychmiast usunąć plaster

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze **15-25°C**, w suchym miejscu, z dala od dzieci i źródeł ciepła.

Dodatkowe informacje:

- opakowanie: **3 plastry (10 × 14 cm)**